

Quick & Clean Wipes



- ▶ **trockene Einmalvliesstofftücher zur Tränkung mit Desinfektionsmittel PLIWA® Lemon Fresh AF**
- ▶ **große, saugfähige Tücher mit glatter Struktur zum Wischen großer Flächen und medizinischen Inventar**
- ▶ **bei Anwendung von getränkten Vliesstofftüchern zur Desinfektion werden Dämpfe und Aerosole verhindert**

Präparatetyp

K+K Quick & Clean Wipes:

Vliesstuchspender zur Tränkung für K+K Schnelldesinfektion.

K+K Quick & Clean Wipes sind aus qualitativ hochwertigem, fussselfreiem Vliesstoff.

Anwendungsgebiete

K+K Quick & Clean Wipes, trockene Einmalwischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmittel K+K Schnelldesinfektion, für eine schnelle und unkomplizierte Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten.

- ▶ **Kleine, unzugängliche Teile und Ecken, vorher mit einer Sprühdesinfektion benetzten und nach Einwirkzeit mit den Vliesstofftüchern abwischen.**

Art der Anwendung

(Anwendung ist nur auf glatte Oberflächen bezogen)

Tränken Sie die trockenen Wischtücher mit den 1,5 – 2,0 Liter K+K Schnelldesinfektion Nachfüllbeutel.

(70 - 90 Tücher) Nach ca. 30 Minuten ist die Rolle gleichmäßig durchtränkt und einsatzbereit.

Öffnen Sie den Eimer durch Anheben der blauen Kappe, entnehmen Sie dann die gewünschte Menge getränkter Einmaltücher und verschließen Sie den Eimer wieder.

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen, Einwirkzeit einhalten und entsorgen Sie dann die gebrauchten Tücher. Die Einwirkzeit nach VAH und Standzeit bis 28 Tage = 5 Minuten.

Tragen Sie bitte auf dem beigefügten Zusatzetikett den Produktnamen der Tränkflüssigkeit, die Lot- Nr., die Einwirkzeit und die Haltbarkeit der Lösung mit Unterschrift des herstellenden Mitarbeiters ein.

Neubefüllung des Spendereimers

1. Vollständige Entleerung des Spendereimers.
2. Spendereimer vor erneuten Befüllen gründlich mit heißem Wasser reinigen und anschließend mit etwas PLIWA Lemon Fresh AF desinfizieren.
3. Eimer mit trocknen Einmalwischtüchern und entsprechender Menge PLIWA Lemon Fresh AF aus dem Nachfüllbeutel befüllen.

4. Auf dem Desinfektionsmitteleimer ist das Datum der Nachfüllung mit Namenszeichen des Ausführenden anzugeben, sowie Lot- Nr. und Verfalldatum vom Nachfüllbeutel auf den Eimer zu übertragen.
5. Es ist darauf zu achten, dass der Spendereimer dicht ist, um Verdunstungen von K+K Schnelldesinfektion zu vermeiden.

Hinweis:

Da es sich bei den Tüchern um einen Binder mit gebundenen Zellulose- Vlies handelt, wird ein Abrieb und somit eine Fusselbildung auf rauen Oberflächen nicht ausgeschlossen.

Produktzusammensetzung / Eigenschaften

K+K Quick & Clean Wipes besteht aus:

- 70/90 reißfesten, fusselfreien, saugfähigem Vlies (50g/m²), 30 x 30 cm.
- sparsam im Verbrauch von Tüchern u. Anwendungslösung
- stabiler Spender mit Tragegriff und speziellem Verschlusssystem
- Bei ordnungsgemäß verschlossenem Behälter beträgt die Standzeit der Lösung 28 Tage.

Besonderer Hinweis

Bei der Herstellung von Quick & Clean Wipes mit K+K Schnelldesinfektion sind die Anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise, sowie die DGHM / VAH- Einwirkzeiten zu beachten.

Lieferformen / VE

- 3 Liter Spendereimer ▶ 70er Tücher
5 Liter Spendereimer ▶ 90er Tücher

Dazu können unsere passenden Nachfüllbeutel bestellt werden:

- 1,5 Liter Nfb. für den 3 Liter Eimer
2,0 Liter Nfb. für den 5 Liter Eimer

Zertifizierung



Tränkflüssigkeit

**K+K Schnelldesinfektion gelistet als
PLIWA[®] Lemon Fresh AF (VAH).**

Gutachten

Dr. rer. Nat. Holger Brill, Hamburg:

- ▶ Gutachten über die desinfizierende Wirkung des Vliesstoffsystems K+K Quick & Clean Wipes in Kombination mit dem Flächendesinfektionsmittel K+K Schnelldesinfektion vom 28.05.2008

Gutachten über die Prüfung der mikrobiologischen Stabilität von K+K Schnelldesinfektion in Kombination mit dem Vliesstoffsystem K+K Quick & Clean Wipes vom 28.05.2008.

Anleitung zum Ansetzen des Vliestuchrollensystems im Spendereimer

1. Öffnen Sie den Deckel des Spendereimers (Tragen Sie aus Gründen des Personalschutzes und zum Schutz vor Kontamination der Vliesrolle Kittel und Handschuhe)
2. Entnehmen Sie die gewünschte Rollengröße aus der Verpackung
3. Setzen Sie die Vliestuchrolle in den Spendereimer.
4. Füllen Sie Ihre vorbereitete Desinfektionsmittellösung in den Spendereimer. Beachten Sie dabei, dass Sie die Desinfektionsmittellösung gleichmäßig über der Vliestuchrolle verteilen.
5. Führen Sie den Vliestuchrollenanfang aus der Rollenmitte durch die geschlitzte Öffnung im Deckel des Spendereimers.
6. Schließen Sie den Deckel des Spendereimers mit einem starken Druck am Rand und schließen Sie den Verschlussdeckel des Entnahmesystems. (Achten Sie darauf, dass der Eimer vollständig verschlossen ist)
7. Beschriften Sie das Etikett mit Lot- Nr., Einwirkzeit, Ansetzdatum + Haltbarkeit (28 Tage) der verwendeten Desinfektionsmittellösung. (Dokumentation ist Vorschrift)
8. Verwerfen Sie evtl. verbliebene Tücher nach Ablauf der Haltbarkeit (28 Tage) aus dem Spendereimer. Der Spendereimer kann wieder verwendet werden. s. Schritt 1 (Vor Wiederverwendung Spendereimer gründlich reinigen.)

Stand: 24.8.2009

Seite 2 von 2