

Gebrauchsinformation

KK Prothesen-Reinigungsgel

KK Prothesen-Reinigungsgel für die gründliche, wirkungsvolle Pflege und Erhaltung der dritten Zähne und Zahnspangen.

- **Reicht für ca. 150 Anwendungen**
- **Reinigungsdauer 30 Sekunden**
- **Praktische Dosierung durch Spender**
 - **Langanhaltende Frische**
- **Schaumbildendes, schonendes Reinigungsgel**

Das KK Prothesen-Reinigungsgel-Set beinhaltet eine Spezialreinigungsbürste und das Spezialreinigungsgel.

Es wurde speziell für die tägliche Reinigung und Pflege der „dritten Zähne“ und Zahnspangen entwickelt.

Durch die Kombination von Prothesen - Reinigungsgel und der Spezial Reinigungsbürste werden bakterielle Beläge und Verunreinigungen wie Teer, Rauch, Zahnstein usw. kraftvoll von (Teil-) Prothesen und Zahnspangen beseitigt.

Anwendung: Geben Sie durch einmaliges Drücken auf den Dosierspender das KK Prothesen-Reinigungsgel auf die Prothese oder Zahnspange. Anschließend mit der angefeuchteten Spezialreinigungsbürste innen und außen durch rotierende Bewegungen säubern und unter fließendem Wasser abspülen.