

Sicherheitsinformationen

KK Kalt-Warm-Kompressen

Allgemeiner Hinweis:

Lesen Sie diese Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie die Komresse verwenden. Bewahren Sie diese Hinweise für zukünftige Anwendungen auf.

1. Nur wie vorgesehen verwenden

Die KK Kalt-Warm-Komresse ist ausschließlich zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen – als Kälte- oder Wärmeanwendung zur Linderung von Beschwerden wie Schwellungen, Muskelverspannungen oder Schmerzen.

2. Nicht direkt auf die Haut auflegen

Legen Sie die Komresse niemals ohne Schutzschicht (z. B. Vlieshülle oder Tuch) direkt auf die Haut. Es besteht Verbrennungs- oder Erfrierungsgefahr, insbesondere bei empfindlicher Haut.

3. Anwendung bei Kindern

- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen anwenden.
 - Nicht bei Säuglingen oder Kleinkindern ohne Rücksprache mit medizinischem Fachpersonal verwenden.
-

4. Wärmeanwendung – Vorsicht vor Überhitzung

- **Erwärmen Sie die Komresse nur gemäß Anleitung.**
 - **Nicht überhitzen!** Zu hohe Temperaturen können die Komresse beschädigen oder zu Verbrennungen führen.
 - Die Komresse kann beim Erhitzen in der Mikrowelle ungleichmäßig warm werden – prüfen Sie die Temperatur vor der Anwendung.
-

5. Kälteanwendung – Vorsicht vor Erfrierungen

- Komresse nicht länger als 20 Minuten am Stück anwenden.

- Bei Kälteempfindlichkeit oder Durchblutungsstörungen vorher ärztlichen Rat einholen.
-

6. Beschädigte Kompressen nicht verwenden

- Kompressen mit Rissen, Undichtigkeiten oder geplatzttem Inhalt dürfen nicht mehr benutzt werden.
 - Bei Kontakt mit auslaufender Flüssigkeit Haut gründlich mit Wasser abspülen. Bei Reizung ärztlichen Rat einholen.
-

7. Medizinische Rücksprache erforderlich bei:

- Durchblutungsstörungen
 - Hauterkrankungen oder offenen Wunden
 - Neurologischen Störungen mit eingeschränktem Temperaturempfinden
 - Schwangerschaft (je nach Anwendung)
-

8. Lagerung und Entsorgung

- Kühl und trocken lagern, nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
 - Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Nicht im Hausmüll entsorgen – bitte regionale Entsorgungsvorschriften beachten.
-

Hersteller/Vertrieb:

KK Hygiene Produkte – Werner-von-Siemens-Strasse 2 – 49401 Damme – office@kk-store.de

Stand der Information: April 2025!