

## **Sicherheitsinformationen**

### **KK-Vlieshüllen für Kalt-Warm-Kompressen**

1. Verwendung gemäß Anleitung: Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Verwendung der Kalt-Kompressen und der Vlieshüllen sorgfältig, um optimale Ergebnisse zu erzielen und Verletzungen zu vermeiden.
  2. Temperaturkontrolle: Überprüfen Sie vor der Anwendung die Temperatur der Komresse. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, um Hautschäden oder Verbrennungen zu verhindern.
  3. Schutz der Haut: Verwenden Sie die Vlieshülle immer als Barriere zwischen der Komresse und der Haut, um direkten Kontakt zu vermeiden und Hautirritationen zu verhindern.
  4. Anwendungsdauer: Halten Sie sich an die empfohlene Anwendungsdauer. Zu langes Anwenden kann zu Hautschäden führen.
  5. Nicht bei offenen Wunden verwenden: Verwenden Sie die Kompressen nicht auf offenen Wunden, entzündeten oder geschädigten Hautstellen.
  6. Überwachung bei Kindern: Bei der Anwendung bei Kindern sollte immer eine Aufsichtsperson anwesend sein, um sicherzustellen, dass die Komresse sicher und korrekt verwendet wird.
  7. Lagerung: Lagern Sie die Vlieshüllen und Kompressen an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
  8. Entsorgung: Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Vlieshüllen gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
  9. Allergien und Empfindlichkeiten: Überprüfen Sie die Materialien auf mögliche Allergien oder Empfindlichkeiten. Bei Hautreaktionen die Anwendung sofort einstellen und einen Arzt konsultieren.
  10. Erste Hilfe: Bei Hautreizungen oder anderen unerwünschten Reaktionen nach der Anwendung, reinigen Sie die betroffene Stelle mit Wasser und Seife und suchen Sie gegebenenfalls medizinische Hilfe.
- Diese Sicherheitsinformationen sollen dazu beitragen, die sichere Verwendung von KK Vlieshüllen für Kalt-Warm-Kompressen zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte bei uns.

R04-2025

Bankverbindung:  
Konto-Nr.:  
BLZ :  
BIC:  
IBAN:

LZO-Damme  
163 13 40  
280 501 00  
SLZODE22XXX  
DE14 2805 0100 0001 6313 40

Anschrift:  
Kreuzkamp Hygiene Produkte  
Werner-von-Siemens-Str. 2  
49401 Damme

Telefon/-Fax  
05491/99 97 10 /-30  
Inhaber:  
Guido Kreuzkamp  
Ust-IdNr.: DE 173578473

E-mail-Adresse:  
office@kk-store.de  
Internet:  
www.kk-hygiene.de