

Gebrauchsinformationen

Ultraschallgel

Anwendungsbereiche: Ultraschallgel ist ein Kontaktmittel zur äußerlichen Anwendung von Ultraschall bestimmt und kann in der therapeutischen und diagnostischen Medizin eingesetzt werden.

Anwendungshinweise: Produkt direkt auf die Hautstelle auftragen. Die dazu benötigte Menge ist von der Größe der Hautfläche abhängig. Bereits geringen Mengen genügen, um ein ausgezeichnetes kontinuierliches Übertragen von Ultraschallwellen zu erreichen. Ultraschallgel ist ein wässriges Produkt, daher ist bei der Anwendung nur ein minimaler Andruck erforderlich, um den Kontakt des Schallkopfes aufrechtzuerhalten. Nach Abschluß der Anwendung kann das Gel durch Abwischen mittels Papiertüchern entfernt werden.

Angaben zum Gel: Das Ultraschallgel ist hochviskos, nicht tropfend; bietet sehr gute Benetzung der Haut und akustische korrekte Übertragung. Geeignet für die breiten Frequenzbereiche, die heute bei medizinischen Ultraschallverfahren Anwendung finden. Die akustischen Parameter wurden durch ein unabhängiges Labor geprüft.

Das Gel bietet höchste Eindringtiefe und geringstmögliche Eigenreflexion, weil es unter Vakuum mikrobblasenfrei hergestellt ist. Das Gel ist nach den dermatologischen Untersuchungen hinsichtlich einer eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen. Die Konservierungsmittelkonzentration wurde mittels Prüfungen auf ausreichende Konservierung auf ein Minimum reduziert und das Konservierungsmittel ist formaldehydfrei. Das auf Wasser Basis hergestellte Produkt ist fettfrei und pH hautneutral.

Verpackungsausführung: Alle Verpackungen sind aus recycle fähigem und nach Gebrauch noch vielseitig verwertbarem Polyethylen bzw. Wellpappe gefertigt. Die verwendeten Flaschen (250 ml, 500 ml und 1 Liter) können sehr leicht aus den Vorratsbehältern (5 Liter oder 10 Liter Kanister und Cubitainer) nachgefüllt werden.

Zur Prüfung der Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen der Verpackung wurde das Produkt auf ausreichende Konservierung getestet. Das Produkt Ultraschallgel hat 12 Monate nach Anbruch der Verpackung eine ausreichende bakterizide sowie fungizide Wirkung im Sinne der Pharm. Eur..

Wir empfehlen eine Verwendung bis zu einem Zeitraum von 6 Monaten nach dem Öffnen. Bitte melden Sie alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle der Gello GmbH Geltechnik und der zuständigen Behörde.

Rev. 03/2020

Bankverbindung:
Konto-Nr.: LZO-Damme
163 13 40
BLZ : 280 501 00
BIC: SLZODE22XXX
IBAN: DE14 2805 0100 0001 6313 40

Anschrift:
Kreuzkamp Hygiene Produkte
Werner-von-Siemens-Str. 2
49401 Damme

Telefon/-Fax
05491/99 97 10 /-30
Inhaber:
Guido Kreuzkamp
Ust-IdNr.: DE 173578473

E-mail-Adresse:
office@kk-store.de
Internet:
www.kk-hygiene.de